


SDI

POLALIGHT

ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

ENJOY A  
BRIGHTER, MORE  
CONFIDENT  
SMILE IN 5 DAYS

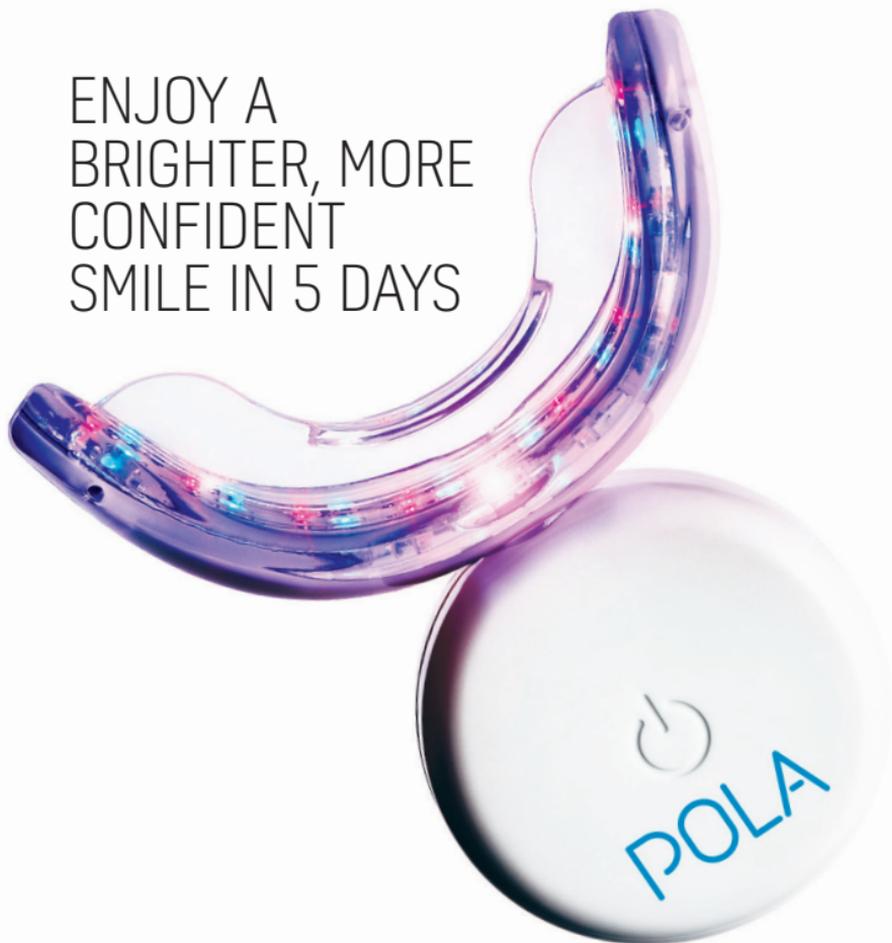

EASY TO USE



FROM JUST  
20 MINUTES  
A DAY



PROFESSIONALLY  
USED AND  
RECOMMENDED



WHITER  
TEETH IN  
FIVE DAYS

# SISTEMA PROFESSIONALE DI SBIANCAMENTO DENTALE

Milioni di persone in 100 Paesi si sono affidate a Pola per ottenere rapidamente un sorriso più bianco e più sano.

Il sistema avanzato di sbiancamento dentale Pola Light combina la premiata formula di sbiancamento di Pola con una tecnologia a LED mirata. Il tutto comodamente da casa propria.

- Con la sua azione rapida, consente di ottenere denti più bianchi in 5 giorni
- Formulato per rimuovere in maniera sicura anche le macchie meno recenti
- Riporta il sorriso alla sua naturale tonalità di bianco
- Extra idratazione per ridurre al minimo la sensibilità
- Remineralizzazione per rinforzare i denti
- Lampada a LED completamente ricaricabile per i trattamenti di sbiancamento dentale successivi

## ISTRUZIONI PER L'USO



- 1** Lavare i denti e annotare la loro tonalità nell'ultima pagina.



- 2** Fissare alla siringa il puntale fornito. Applicare uniformemente una linea sottile di gel Pola lungo il lato interno della parte superiore e della parte inferiore della mascherina LED Pola.

Suggerimento: utilizzare le marcature sulla siringa come guida, applicare un quinto della siringa (0,6 g) per ogni sessione di sbiancamento dentale sia sulla parte superiore che inferiore della mascherina.



- 3** Inserire in bocca la mascherina LED Pola, quindi chiudere a morso.

- Premere due volte il pulsante "on" per il LED **blu/rosso**; il LED si attiverà per 10 minuti

In alternativa, la durata del trattamento può ammontare a 15 minuti qualora non ci siano segni di sensibilità.

- Premere una volta il pulsante "on" per il LED **blu**  
Il LED si attiverà per 15 minuti

La sessione di sbiancamento è completa al termine dell'attivazione del LED. Ripetere due volte al giorno per 5 giorni.

Per risultati migliori, si raccomanda di completare le due applicazioni una dopo l'altra.



- 4** Al completamento del trattamento, estrarre la mascherina e rimuovere eventuali eccessi di gel/saliva con un panno asciutto. Sciacquare la mascherina e lavarla con acqua tiepida. Non immergere in acqua.



- 5** Una volta completata la sessione di sbiancamento, sciacquare la bocca o lavare i denti.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## PER PAZIENTI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE ODONTOIATRICO

### **Pola Day perossido di idrogeno 6%**

#### **Sistema avanzato di sbiancamento dentale**

Pola Day è una soluzione per sbiancamento dentale a pH neutro da usare a casa. Pola Day ha un aroma piacevole, è completamente trasparente e composto da una miscela di lenitivi, condizionatori e un contenuto di acqua sufficientemente elevato da ridurre ulteriormente la sensibilità.

#### **INDICAZIONI D'USO:**

- Sbiancamento di denti vitali discromici.
- Sbiancamento di denti non vitali discromici.

#### **CONSERVAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ**

- Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce diretta del sole a temperature tra 2° e 25°C (35°-77°F).
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Per la mascherina LED Pola è concesso un periodo di garanzia di un (1) anno. Conservare la prova di acquisto per poter richiedere la garanzia.
- Per caricare la mascherina LED Pola: quando la spia del LED inizia a lampeggiare, caricare la mascherina Pola utilizzando il cavo di ricarica USB in dotazione. La spia continuerà a lampeggiare durante il caricamento e smetterà di lampeggiare a carica completa.

#### **PER RISULTATI EFFICACI**

- Non mangiare, bere o fumare durante il trattamento.
- Non fumare subito dopo il trattamento; attendere almeno due ore.
- Evitare cibi e bevande altamente pigmentati per almeno 48 ore dopo il periodo di trattamento, oppure consumarli con moderazione.
- Utilizzare il gel a temperatura ambiente.

#### **PRECAUZIONI**

- Utilizzare sotto la supervisione di un dentista.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare in gravidanza e allattamento.
- Alcuni Paesi prevedono limitazioni per le quali l'utilizzo di prodotti sbiancanti non è autorizzato al di sotto di una certa età. Tutti i Paesi europei: sotto i 18 anni; Nuova Zelanda: sotto i 16 anni.
- I pazienti con anamnesi di allergie chimiche sono invitati a sottoporsi a test allergici presso uno specialista prima di utilizzare questi prodotti.
- Interrompere l'uso in caso di insorgenza di sensibilità o reazioni insolite, quindi consultare il dentista.
- Non iniettare Pola Day nel corpo.
- **ATTENZIONE: LA LEGGE FEDERALE LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO UNICAMENTE A O SU ORDINE DI UN DENTISTA.**  
Per le schede su dati e sicurezza visitare il sito [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) o contattare il rappresentante locale.

Nota: i pazienti con sensibilità dovranno osservare uno o due giorni di pausa tra i trattamenti. Si raccomanda anche una durata del trattamento ridotta.

#### **PRIMO SOCCORSO**

**Occhi (contatto):** sollevare le palpebre e sciacquare con acqua corrente per almeno 15 minuti. Consultare un medico se i sintomi persistono.

**Pelle (contatto):** lavare accuratamente con acqua e consultare un medico se i sintomi persistono.

**Ingestione (elevate quantità):** in caso di ingestione, NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca. Bere molto latte o acqua, quindi consultare un medico.

**Inalazione:** nessun sintomo previsto.