

Deep Shape

by 

Sagomatura

Detersione

Otturazione

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

 Dentsply
Sirona

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

SAGOMATURA

Impostazioni motore: 400 rpm / 4-5.2 Ncm

SEQUENZA BASE



Slider 016.002v



Shaper 020.004v



F1 020.007v



F2 025.008v



F3 030.009v

SOLO PER CANALI LUNGI
E STRETTI



Slider 016.002v



FX 035.012v



FXL 050.010v



DETERSIONE

Dopo la rimozione di ogni strumento, detergere con l'ago di irrigazione.




Usare SmartLite® Pro EndoActivator® per rimuovere i detriti



In arrivo



OTTURAZIONE

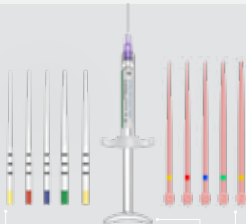

Punte di carta
AH Plus® Bioceramic Sealer
Punte di gutta-perca Conform Fit

ACCESSORI



Versione
manuale
corrispondente



SX

Modificatore
di orifizio

		EC REP	CE
Strumenti	Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3, CH-1338 Ballaigues, Switzerland	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz, Germany	2797
Guttaperca e punte di carta	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604, USA	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz, Germany	2797
Ago per irrigazione	Produits Dentaires SA Rue des Bosquets 18, CH-1800, Vevey	PD Dental EU 74200 Thonon-les-Bains, France	1639
AH Plus[®] Bioceramic Sealer	Maruchi 2-208, Medical Industry Complex Blidg., 42-10, Taejanggongdangil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311, South Korea	Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg, Germany	0197