




## Tabella forme denti

- SR Vivodent®
- SR Orthotyp®


# SMALL

## SR Vivodent®

SOFT

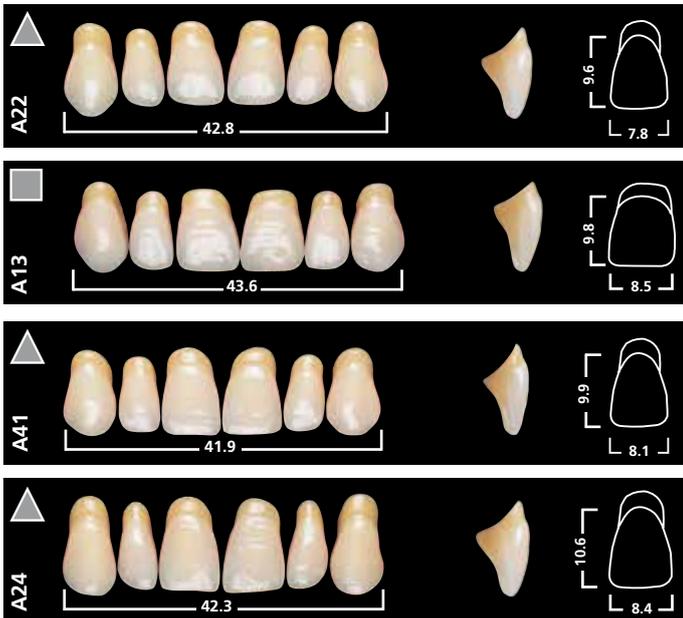

Bold

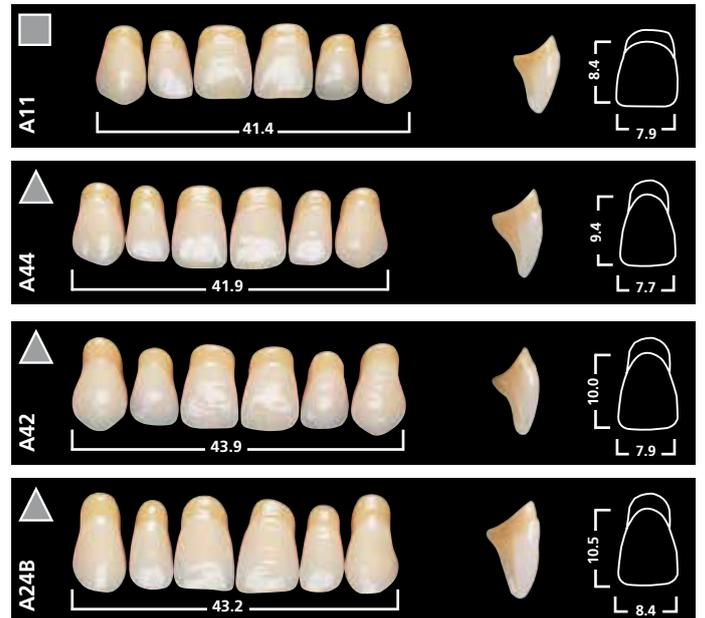

## SR Orthotyp®



# MEDIUM

## SR Vivodent®

### SOFT



### Bold



## SR Orthotyp®





# LARGE

## SR Vivodent®

SOFT

Bold

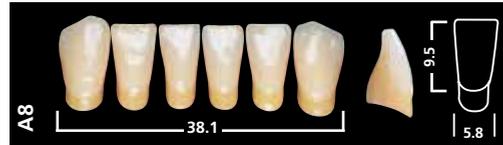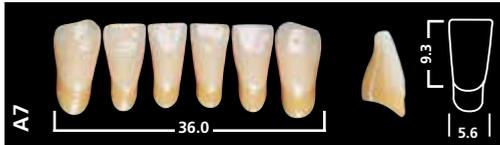

## SR Orthotyp®



# Criteri di scelta

## Denti anteriori

I denti anteriori della Ivoclar Vivadent si suddividono anche in forme dentali quadrate, triangolari ed ovali. Sebbene si tratti di descrizioni soltanto generiche, vi sono tuttavia determinate caratteristiche, che corrispondono per ogni categoria.

È tuttavia importante ricordare che ogni singola forma dentale possiede il proprio inconfondibile carattere. La forma dovrebbe sempre essere considerata con un set completo e non essere osservata esclusivamente da una singola caratteristica.



### Forme dentali quadrate

In queste forme dagli angoli accentuati, domina il dente incisivo centrale. La convessità labiale verticale decorre moderatamente e la cresta alveolare ha un andamento molto accentuato, facendo pensare ad un caso di masticazione normale.



### Forme dentali triangolari

Corone snelle, che si assottigliano verso la zona cervicale caratterizzano questo gruppo di forme. La convessità verticale è mediamente accentuata. Il grande incisivo ha una gradevole forma leggermente triangolare. La cresta alveolare decorre anch'essa a forma triangolare e ricorda i rapporti della masticazione incrociata.



### Forme dentali ovali

I denti di questo gruppo hanno forti caratteristiche di curvatura. La curvatura labiale è particolarmente accentuata. Il decorso ovale della cresta alveolare si trova spesso nei casi di masticazione bassa.

# Determinazione del colore

## Con la scala colori universale Chromascop

In protesi combinata, la scala colori Chromascop consente una scelta cromatica fra denti e materiali da rivestimento estetico in resina, composito o ceramica all'interno dello stesso sistema cromatico.

- SR Vivodent
- SR Orthotyp



## Caratterizzazione di denti artificiali in resina

Le crescenti esigenze estetiche nei confronti del restauro protesico rimovibile rendono indispensabile la caratterizzazione individuale dei denti artificiali in resina. In protesi combinata questo fa parte di un restauro protesico di elevata qualità.

La composizione dei denti consente modifiche di forma e colore tramite un materiale adesivo, seguendo le rispettive istruzioni d'uso.



Immagine: Hans Jürgen Joit, Germania

# Tabella di combinazione

SR Vivodent®		SR Orthotyp®
Denti anteriori		Denti posteriori
superiori	inferiori	superiori/inferiori
A11	A3	N3
A12	A5	N3
A13	A5	N3/N5
A14	A6/A7	N5
A15	A8	N4
A17	A9	N6
A22	A3	N3/N5
A24	A2	N2
A24B	A4/A5	N2
A25	A9	N4
A27	A8	N4
A32	A3/A5	N3/N5
A36	A7	N5
A41	A3/A5	N3/N5
A42	A5	N3/N5
A44	A3	N3/N5
A54	A5	N5
A56	A7/A8	N5
A66	A5/A7	N5
A68	A7	N4/N5

La presente tabella di combinazione è consigliata come linea guida. In caso di particolari rapporti anatomici, sono possibili scostamenti.

## ICDE Ivoclar Vivadent



Sempre aggiornati - questo è marchio della Sua competenza. Ivoclar Vivadent è di supporto con numerosi seminari e corsi pratici di formazione fornendo le conoscenze specifiche del prodotto ed il relativo know how per l'utilizzo e la lavorazione. L'ICDE offre costantemente attuali corsi di formazione ed aggiornamento.

**Si informi alla nostra homepage.**

**CE 0123**

Le descrizioni ed i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti.  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
IT/2017-06-14

Produttore e distributore  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Distribuzione Italia  
**Ivoclar Vivadent srl**  
Via Isonzo 67/69  
I - 40033 Casalecchio di Reno  
(BO)  
Tel. +39 051 611 35 55  
Fax +39 051 611 35 65  
[info@ivoclarvivadent.it](mailto:info@ivoclarvivadent.it)  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

  
**ivoclar  
vivadent®**  
passion vision innovation