



initial[™]
IQ ONE SQIN

Sistema di ceramiche
verniciabili per
"colore e forma"

GC

Il 90% delle protesi viene ordinato in un colore semplificato...

Da qualche tempo ormai, i restauri posteriori possono essere realizzati con un unico materiale quale il disilicato di litio o la zirconia, i quali producono risultati sufficientemente estetici senza dover ricorrere a complesse tecniche di stratificazione. I lavori monolitici sono in crescita!

Con **GC Initial IQ ONE SQIN** – il sistema di ceramiche verniciabili per “colore e forma” – si possono realizzare in modo altrettanto semplice dei restauri esteticamente belli nella regione anteriore. Questo sistema, che si basa sulla “filosofia IQ” di GC Initial, si compone di diversi materiali ceramici perfettamente adattati per essere utilizzati insieme, garantendo una finalizzazione efficiente ed esteticamente convincente dei restauri monolitici e ridotti vestibolarmente.





initial[™]
IQ ONE SOIN

Initial IQ Lustre Pastes ONE

È la ceramica verniciabile più versatile in assoluto per la colorazione esterna e per la caratterizzazione interna delle sottostrutture. Quando queste paste vengono utilizzate con SQIN, fungono anche da cottura delle connessioni.

- ✓ Consistenza pronta all'uso
- ✓ Fluorescenza intrinseca
- ✓ Profondità del colore tridimensionale

Initial IQ SQIN

Completa il contorno finale dei restauri garantendo vitalità, texture e lucentezza naturale.

- ✓ Facile definizione della forma e della texture
- ✓ Effetto di auto-glasura
- ✓ Struttura superficiale tridimensionale

Initial Spectrum Stains

Supercolori in polvere fine per effetti di individualizzazione supplementari.

- ✓ Infinite sfumature cromatiche
- ✓ Possono essere miscelati con le Lustre Pastes ONE o SQIN



Con **GC Initial IQ ONE SQIN** - il sistema di ceramiche verniciabili per "colore e forma" - si possono ottenere risultati estetici eccellenti in poco tempo e in modo semplice rispetto ai restauri convenzionali stratificati, ottenendo al contempo un significativo risparmio di tempo.



Come funziona il prodotto? Siete voi a scegliere...

Tecnica di micro-stratificazione (monolitici ridotti a livello micro-vestibolare)

Le masse GC Initial IQ Lustre Pastes ONE vengono utilizzate come strato di colore e di individualizzazione e garantiscono una cottura delle connessioni perfetta prima di applicare le polveri SQIN. Con la tecnica della micro-stratificazione, le masse SQIN possono essere applicate facilmente in strati dello spessore compreso tra 0,1 e 0,6 mm sopra la superficie delle Lustre Pastes ONE verniciate e cotte. Grazie alla raffinata miscela di vetri a base feldspatica, si ottiene un effetto tridimensionale realistico che di conseguenza conferisce al restauro profondità cromatica e traslucenza naturale.


Miscelate con il liquido Form and Texture, le polveri SQIN diventano un impasto molto compatto e denso di ceramica. Grazie alle loro speciali proprietà di applicazione e modellazione, la testurizzazione delle singole superfici risulta semplificata, con proprietà di auto-glasura dopo la cottura della ceramica.




... si ottiene ciò che si applica con il pennello!

Tecnica di verniciatura (monolitici)

Disponibili in una consistenza pronta all'uso, le ceramiche verniciabili a base feldspatica GC Initial IQ Lustre Pastes ONE aggiungono ai restauri monolitici profondità cromatica e trasparenza realistica, con una lucentezza molto naturale. Le paste possono essere applicate in uno strato più spesso per garantire una vitalità impareggiabile e una glasura molto naturale. Con la loro fluorescenza intrinseca, sono perfette per esaltare la fluorescenza dei restauri monolitici, soprattutto quando si usa la massa Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

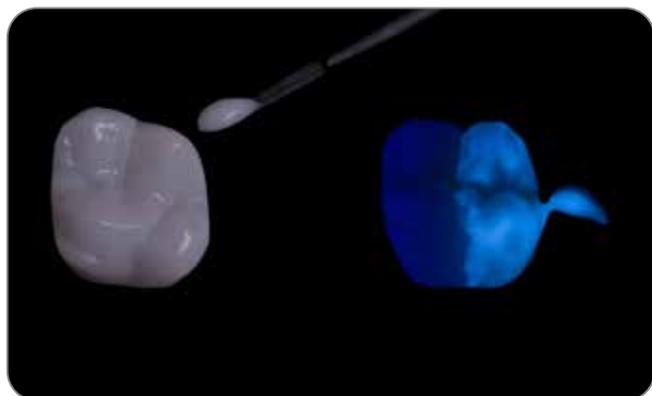

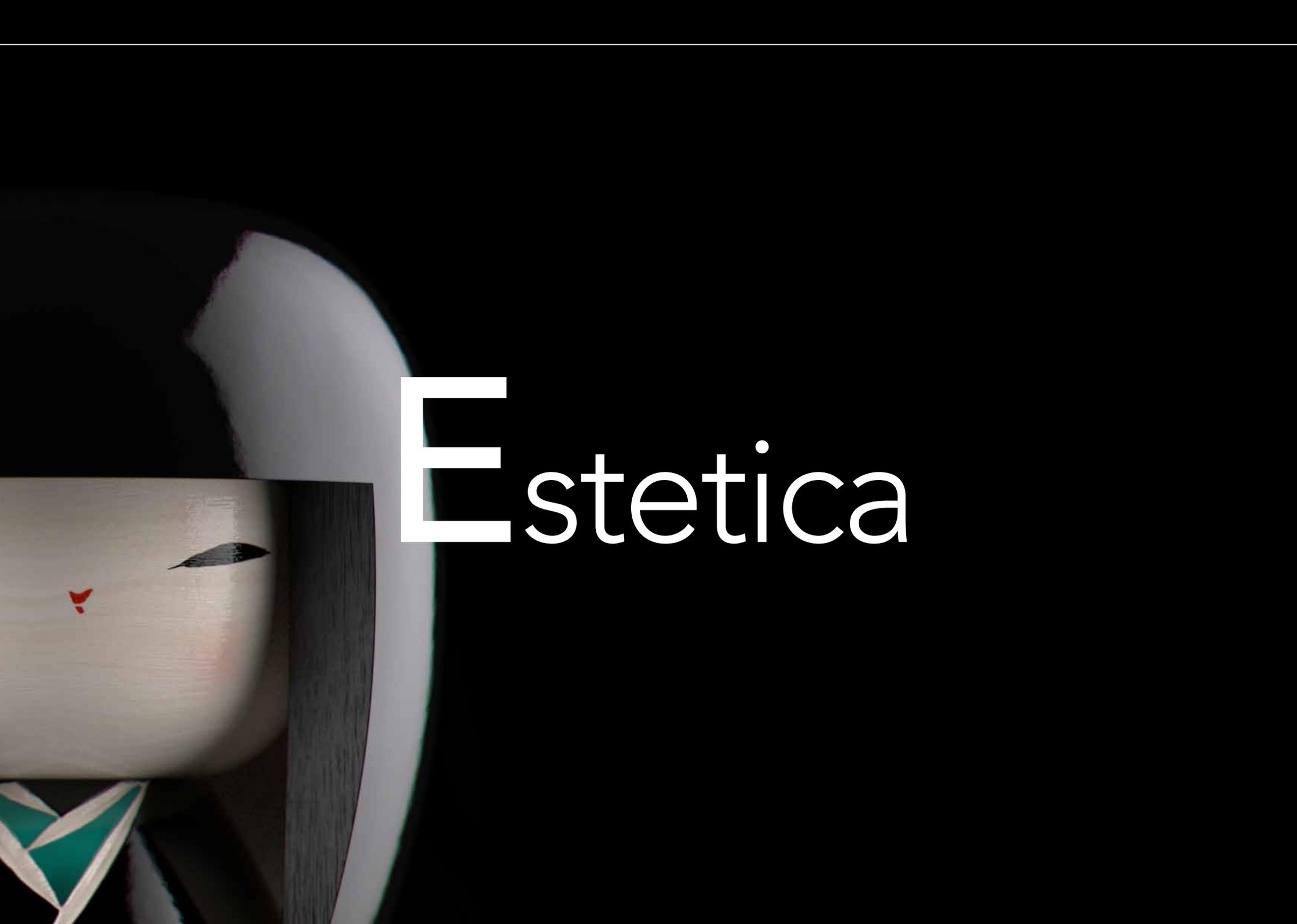

Estetica

Bellezza dall'interno



Fluorescenza naturale



Estetica rossa e bianca



Massima estetica con una micro-stratificazione



Procedura facile e veloce



Forma e texture fine vengono create nella fase bagnata.
Nessun cambiamento dopo la cottura.



Le Initial IQ Lustre Pastes ONE fungono anche da cottura delle connessioni.



Proprietà di auto-glasura.
Con una singola cottura si ottiene una rifinitura glasurata esteticamente bella.

Praticità



Versatilità

Un solo sistema...



... per tutti i manufatti in ceramica integrale in zirconia e disilicato di litio



... per la tecnica di micro-stratificazione e per la tecnica di verniciatura



... per restauri anteriori e posteriori

ONE SQIN System Set permette di ottenere facilmente risultati altamente estetici, paragonabili ai restauri convenzionali stratificati, ma con un notevole risparmio di tempo anche perché il set contiene una selezione dei principali componenti ceramici.



GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8ml
- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
- 1x IQ LP ONE Mixing Dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Plastic Cover
- 1x IQ ONE SQIN Technical Manual
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x SPS Colour Chart



GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
- 1x IQ SQIN Technical Manual



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8ml
- 1x IQ LP ONE Mixing dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x IQ LP ONE Technical Manual



Tecnica ONE SQIN – per tutti i restauri in zirconia e in disilicato di litio

- ✓ Creare i dettagli di forma e texture fine nella fase bagnata – Nessuna variazione dopo la cottura.
- ✓ Proprietà di auto-glasura – Con una sola cottura si ottiene una rifinitura glasurata esteticamente bella.
- ✓ Livello di fluorescenza ottimale – Garantisce lo stesso aspetto dei denti naturali in tutte le condizioni di luce.
- ✓ Massima estetica all'interno di un micro-strato.



Foto per gentile concessione di:

Michael Brusch (odontotecnico, Germania): pagina 7 (immagini al centro e a destra); pagina 9 (immagini al centro-destra e in basso a destra);

pagina 13 (lato sinistro della parte centrale a sinistra, in alto a destra e lato destro dell'immagine in basso a destra)

Leonardo Cavallo (odontotecnico, Italia): pagina 7 (immagine a sinistra); pagina 9 (immagine in alto a sinistra)

Patric Freudenthal (odontotecnico, Svezia): pagina 13 (lato destro dell'immagine al centro-sinistra)

Stefan Roozen (odontotecnico, Austria): pagina 6 e pagina 10; pagina 13 (lato sinistro dell'immagine in basso a destra)

*initial*TM
IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC ITALIA S.r.l.

Via Calabria 1
I-20098 San Giuliano
Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental
<https://europe.gc.dental/it-IT>

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental