
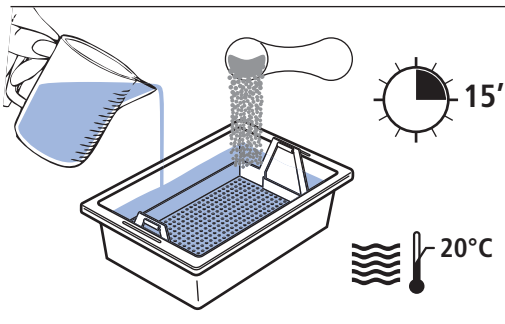


zeta 2 enzyme

INSTRUMENTS

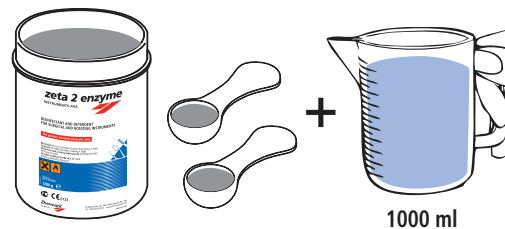

DISINFECTANT AND DETERGENT POWDER FOR SURGICAL AND ROTATING INSTRUMENTS

ACTIVE OXYGEN

Bactericidal: EN 13727, EN 14561 (S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Hirae)
Fungicidal: EN 13624, EN 14562 (C. Albicans, A. Niger)
Mycobactericidal, including tuberculocidal: EN 14348, EN 14563 (M. Terrae, M. Avium)
Virucidal, including HIV, HBV, HCV: EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus)



PG CE 0123



Zhermack
CLINICAL

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (Ro) - Italy
Tel. +39 0425 597 611 - www.zhermack.com

Made in Italy

Disinfecting efficiency and conditions of use of Zeta 2 Enzyme

Micro-organisms	EU Standard	Concentration	Contact time
Bacteria - Enterococcus Hirae - Staphylococcus Aureus - Pseudomonas Aeruginosa	EN13727 (suspension activity)	0.5%	5 mins
	EN14651 (surface activity)	0.5%	5 mins
Fungi - Candida Albicans	EN13624 (suspension activity)	0.5%	5 mins
	EN14652 (surface activity)	0.5%	5 mins
Mycobacterium Tuberculosis (TB) - Mycobacterium Terrae (M. Tuberculosis)	EN14348 (suspension activity)	2%	10 mins
	EN14653 (surface activity)	2%	10 mins
Complex mycobactericide - Mycobacterium Avium	EN14348 (suspension activity)	2%	10 mins
	EN14653 (surface activity)	2%	10 mins
Viruses - Polio Virus - Adenovirus	EN14476	2%	1 min

Zeta 2 Enzyme

IT - Detergente/disinfettante per strumenti chirurgici ed endoscopi

Zeta 2 Enzyme è un detergente/disinfettante in polvere a spettro completo, messo a punto e testato secondo le nuove norme armonizzate europee sulla disinfezione. Zeta 2 Enzyme è adatto per la detersione, la pulizia e la disinfezione ad alto livello dello strumentario odontoiatrico (bisturi, pinze, pinzette, frese, specchietti, sonde, etc) prima del trattamento di sterilizzazione, in autoclave o chimico a freddo. Il prodotto non è adatto per oggetti in rame, ottone, leghe di alluminio, leghe di nichel o per strumenti placcati Nichel-cromo danneggiati. Zeta 2 Enzyme può essere utilizzato anche in lavaendoscopi automatici.

Principi attivi:

> 25% di sbiancante a base ossigeno, > 18% di attivatore, < 5% di tensioattivi anionici e non ionici, agenti inibitori di corrosione, additivi e ausiliari. La dissoluzione della polvere in acqua porta allo sviluppo del principio attivo acido peracetico.

Spettro d'azione:

Battericida, fungicida (test su Candida Albicans) e micobattericida (incluso tuberculicida) in sospensione e in superficie, virucida. Attività in sospensione e di superficie, testata secondo le norme EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Attività virucida testata secondo la norma EN14476.

Uso:

Per ogni litro d'acqua, aggiungere 20 g (corrispondente a 2 misurini) di Zeta 2 Enzyme. Mescolare per agevolare la dissoluzione della polvere. Con la temperatura dell'acqua di almeno 20°C, attendere 15 minuti per avere uno sviluppo di acido peracetico sufficiente per esplicare l'attività disinfettante ad alto livello in 10 minuti. Con la temperatura dell'acqua al di sotto di 20°C, attendere almeno un'ora prima d'immergere gli strumenti. Si raccomanda di attenersi al tempo d'immersione raccomandato. Togliere gli strumenti dal bagno e risciacquarli con acqua corrente ed asciugare. Procedere con la sterilizzazione in autoclave o chimica a freddo con Zeta 2 Sporex. **La soluzione preparata rimane stabile per almeno 8 ore.**

Avvertenze, precauzioni e condizioni di conservazione:

Il prodotto è destinato all'impiego da parte di operatori qualificati, con conoscenza delle dovute norme di sicurezza. Utilizzare guanti protettivi. Operare in locali ben aerati. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco e all'asciutto.

Precauzioni:

Sciacquare e pulire la vaschetta di diluizione prima di introdurre Zeta 2 Enzyme. Non mescolare Zeta 2 Enzyme con altri disinfettanti.

Istruzioni relative alla sicurezza:

R8: Può provocare l'accensione di materie combustibili. - R22: Nocivo per ingestione. - R36: Irritante per gli occhi. - R41: Rischio di gravi lesioni oculari.