

COE-COMFORT™

I

CONDIZIONATORE TESSUTI PER EDENTULI

Prima dell'utilizzazione leggere attentamente le istruzioni. Destinato all'uso dentale professionale per le indicazioni raccomandate:

INDICAZIONI RACCOMANDATE:

Ribasature di protesi difettose e come condizionatore tissutale per facilitare la guarigione di tessuti molli danneggiati. Materiale da impronta funzionale per protesi totali. Materiale da impronta funzionale per la ribasatura di aree edentule nell'estensione distale di parziali. Materiale da impronta per la fabbricazione di otturatori. Ribasatura di splintaggi chirurgici e paradontali. Sussidio diagnostico nella individuazione di aree di pressione delle protesi. Riabasatura di cucchiaini individuali per la registrazione delle relazioni mandibolari.

CONTROINDICAZIONI:

Non usare su Pazienti che hanno già mostrato una sensibilità a questo materiale, in caso di allergia sospendere l'utilizzazione del prodotto e consultare un Medico.

ISTRUZIONI PER L'USO:

CONDIZIONAMENTO TISSUTALE:

1. **Considerazioni pre-trattamento:** Il ripristino di condizioni sane per tessuti soffici danneggiati richiede tempo e numerose applicazioni di COE-COMFORT. Raccomandiamo, prima di iniziare il trattamento e ad ogni visita successiva, di prendere una impronta e colare un modello. Il confronto dei modelli dimostrerà il buon andamento progressivo del trattamento. Se le protesi esistenti non provvedessero una buona copertura dei tessuti e non fossero in una corretta relazione centrica e verticale, dovrebbero venir ribasate e corrette prima di iniziare il trattamento. Nel caso invece fosse necessario un trattamento sia dei tessuti vicini alla protesi superiore che a quella inferiore si eseguano trattamenti separati. Se difficile da attuare pratica, allora si prepari prima quella superiore e la si applichi, poi quella inferiore. Si faccia uso di due miscele separate di COE-COMFORT.
2. **Preparazione della protesi:** Usando un manipolo rimuovere i sottosquadri per evitare appigli sulla protesi. Lavare ed asciugare accuratamente. Ricoprire le flange labiali e buccali con COE LUBRICANT per evitare che COE-COMFORT aderisca.
3. **Miscelazione:** Versare 5 ml di liquido COE-COMFORT in una coppetta monouso. Riempire il misurino rosso con polvere COE-COMFORT (6 g) e aggiungerla lentamente al liquido. Miscelare accuratamente per 30 secondi. Attendere per circa un minuto che il materiale miscelato abbia uno scorrimento filamentoso dalla spatola. Note: Usando meno liquido si ottiene una miscela più densa ad indurimento più rapido e viceversa.

4. **Ribasatura della protesi:** Spargere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da ricoprire compresi i bordi periferici. Durante questa operazione chiedere al Paziente di sciacquare accuratamente con acqua fredda. La diminuita temperatura in bocca assicura un tempo di lavoro più favorevole. Inserire la protesi come per l'esecuzione di una impronta. Chiedere al Paziente di chiudere MOLTO DELICATAMENTE in occlusione. Dopo che la protesi è stata ben posizionata, far parlare il Paziente per pochi minuti, in modo da stimolare i tessuti. Dopo 4 o 5 minuti, rimuovere la protesi e sciacquare bene in acqua fredda. Rimuovere il materiale in eccesso. Controllare l'area di contatto della protesi sui punti di impatto dove il rosa della dentiera mostra il bianco di materiale COE-COMFORT. In questi casi assottigliare l'area con il manipolo e quindi lavare ed asciugare la dentiera. Miscelare una piccola quantità di COE-COMFORT ed applicare sull'area appena assottigliata. Chiedere al Paziente di sciacquare accuratamente con acqua fredda, inserire nuovamente la dentiera e chiedere al Paziente di chiudere MOLTO DELICATAMENTE in occlusione.
5. **Trattamento ulteriore:** Il ripristino totale di condizioni sane per i tessuti soffici danneggiati richiede tempo e possono essere necessarie numerose applicazioni ripetitive di COE-COMFORT. Dopo il primo appuntamento verranno fissati gli appuntamenti successivi a 2-4 giorni dopo ogni trattamento. Ad ogni seduta COE-COMFORT verrà rimosso dalla dentiera usando un manipolo e si procederà ad una nuova applicazione di COE-COMFORT come descritto precedentemente. Due o tre trattamenti possono essere sufficienti, ma si potranno continuare le applicazioni fino a che non si riterrà che ulteriori trattamenti non porterebbero nessun miglioramento. A quel punto si procederà con una ribasatura finale eseguita con un ribasante duro.

ALTRE INDICAZIONI:

Per altre indicazioni verrà impiegata la stessa procedura usata per il condizionamento dei tessuti, adattando semplicemente la tecnica alla particolare applicazione.

IMMAGAZZINAGGIO:

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente (70° a 77°F; 21° a 25°C). (3 anni di conservazione garantita.)

CONFEZIONI:

COE-COMFORT Pacco per Professionisti

COE-COMFORT Polvere, 170 g (6 oz)

COE-COMFORT Liquido, 177 ml (6 oz)

ATTENZIONE:

Il liquido COE-COMFORT è infiammabile. Evitare sorgenti di fuoco. COE-COMFORT contiene alcool denaturato. In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e contattare un Medico.