

zeta 3 soft

Disinfettante privo di aldeidi, pronto all'uso, a spettro di azione biocida



INDICAZIONI

ZETA 3 SOFT è indicato per la rapida disinfezione ad alto livello e pulizia tra un paziente e l'altro di superfici dei dispositivi medici (manipoli, ripiani, poltrone, contrangoli, portastrumenti, portapellicole, maniglie delle lampade, lavabi dei riuniti, ecc.). La particolare formulazione, senza Sali d'ammonio quaternari e con una bassa percentuale di isopropanolo, rende ZETA 3 SOFT poco aggressivo per le vie aeree e non provoca sonnolenza.

IMPIEGO

Spruzzare ZETA 3 SOFT sulle superfici e gli oggetti da disinfettare fino ad ottenere un velo continuo. Lasciare agire per almeno 1 minuto, quindi sfregare la superficie e il dispositivo medico con una salvietta ed infine lasciar asciugare. In alternativa, è possibile spruzzare ZETA 3 SOFT su una salvietta e passarla sulle superfici o i dispositivi da disinfettare.

SPETTRO D'AZIONE

Battericida: EN 13727, EN 14561 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)

Fungicida: EN 13624, EN 14562 (*C. albicans*, *A. niger*)

Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*)

Virucida, inclusi HIV, HBV, HCV: EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus)

PRINCIPI ATTIVI

100 g di ZETA 3 SOFT contengono

- 34,4 g di etanolo

- 14 g di isopropanolo

CONSIGLI

Per le superfici particolarmente delicate si consiglia l'impiego di ZETA 3 FOAM.