

zeta 3 soft

SURFACES



DISINFECTANT FOR SURFACES OF MEDICAL DEVICES AND EQUIPMENT

READY TO USE

**LOWER ALCOHOL
CONTENT**

Bactericidal: EN13727, EN 14561 (S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Hirae)

Fungicidal: EN13624, EN14562 (C. Albicans)

Tuberculocidal: EN14348, EN14563 (M. Terrae)

Virucidal, including HIV, HBV, HCV: EN14476

(Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus)



Last Update: 04/2009

Reorder N.
REF C810024

5000 ml e



Zhermack®
CLINICAL



Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (Ro) - Italy
Tel. +39 0425 597 611 - www.zhermack.com

Made in Italy



Zeta 3 Soft

IT - Disinfettante per superfici di dispositivi medici ed apparecchiature

Zeta 3 Soft è un disinfettante privo di aldeidi, pronto all'uso e ad ampio spettro d'azione biocida, messo a punto e testato secondo le nuove norme armonizzate europee sulla disinfezione. Zeta 3 Soft è indicato per la rapida disinfezione ad alto livello e pulizia tra un paziente e l'altro di superfici dei dispositivi medici (manipoli, ripiani, poltrone, contrangoli, portastrumenti, portapellicole, maniglie delle lampade, lavabi dei riuniti etc). La particolare formulazione, priva di sali d'ammonio quaternari e con una bassa percentuale di isopropanolo rende Zeta 3 Soft poco aggressivo per le vie aeree e non provoca sonnolenza. Da non utilizzare su superfici delicate, per le quali è consigliato Zeta 3 Foam.

Composizione:

100 g di Zeta 3 Soft contengono 34,4 g di etanolo, 14 g di isopropanolo, tensioattivi non ionici, additivi, ausiliari ed acqua q.b. a 100.

Spettro d'azione:

Battericida, fungicida (test su Candida Albicans), tubercolicida, virucida. Attività in sospensione e di superficie, testata secondo le norme EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Attività virucida testata secondo la norma EN14476.

Uso:

Spruzzare Zeta 3 Soft sulle superfici e gli oggetti da disinfettare fino ad ottenere un velo continuo. Lasciare agire per almeno 1 minuto. Pulire la superficie/dispositivo con una salvietta prima della completa evaporazione del prodotto per evitare l'eventuale formazione di aloni. Se si dovessero presentare, possono essere facilmente rimossi passando con un panno inumidito la zona interessata. In alternativa, è possibile spruzzare Zeta 3 Soft su una salvietta e passarla sulle superfici o i dispositivi da disinfettare.

Attività virucida:	1 minuto	condizioni di "sporco" (EN 14476)
Attività in sospensione:	5 minuti	battericida (EN13727)
		fungicida (EN13624, test su Candida Albicans)
		tubercolicida (EN14348)
Attività di superficie:	5 minuti	battericida (EN14561)
		fungicida (EN14562, Candida Albicans)
		tubercolicida (EN14563)

Avvertenze, precauzioni e condizioni di conservazione:

Il prodotto è destinato all'impiego da parte di operatori qualificati, con conoscenza delle dovute norme di sicurezza. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco e all'asciutto. **Operare in locali ben aerati. Utilizzare mascherina e guanti protettivi. L'uso del prodotto non è consigliato a persone sensibili agli alcoli.** Evitare il contatto di Zeta 3 Soft con materiali sensibili agli alcoli. Evitare il contatto di Zeta 3 Soft con altri disinfettanti o detergenti, in particolar modo contenenti tensioattivi anionici. Eventuali lievi differenze di profumazione sono dovute alla presenza di fragranze naturali e non pregiudicano la qualità del prodotto.

Istruzioni relative alla sicurezza:

R10: Infiammabile. - R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. - S43: In caso di incendio usare CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.