

Gesso extra duro a espansione controllata
indicato per la lettura con scanner

it

Istruzioni per l'uso

BegoStone plus è un gesso extra duro di classe 4, che si contraddistingue per durezza elevata, resistenza all'abrasione, superficie estremamente liscia ed espansione molto bassa, pari a 0,09 %. BegoStone plus, per i dati tecnici che lo caratterizzano, supera nettamente i requisiti della norma DIN EN ISO 6873.

Dati tecnici

Colore	avorio 35
Tempo di imbibizione	15 secondi
Tempo di lavorazione a circa 20 °C	circa 5 minuti
Tempo di solidificazione (test Vicat)	circa 10 minuti
Resistenza alla compressione dopo 1 ora	60 MPa
Espansione di presa	0,09 %
Tempo di indurimento	circa 30 minuti

Applicazione

Inlay, corone, protesi su impianti e protesi scheletrata e per uso con tecnologia odontotecnica digitale, indicato per la lettura con scanner.

Rapporto di mescola

100 g BegoStone plus + 20 ml acqua o
1 misurino BegoStone plus (ca. 30 g) +
1 lineetta del recipiente graduato per acqua
(circa 6 ml)

Preparazione

Versare BegoStone plus nell'acqua.
Lasciar riposare per 20 secondi e mescolare
brevemente sul vibratore usando la spatola.

Durata di miscelazione

1. Per tutti i materiali da impronta per uso odontoiatrico ed anche i materiali da impronta in silicone come Wirosil®: miscelazione meccanica circa 45 secondi a circa 250 – 300 giri/minuto. Riempire l'impronta sul vibratore.
2. Per i materiali da impronta reversibili per gesso come Wirogel® M: miscelazione meccanica circa 60 secondi, manuale circa 120 secondi. Colare l'impronta sul vibratore, l'impronta colata non deve essere più vibrata.

Consigli per la lavorazione

1. La variazione del rapporto gesso/acqua 100 g / 20 ml +/- 1,5 ml modifica le caratteristiche e le proprietà di lavorazione del materiale.
 - Una minore quantità d'acqua aumenta la durezza del gesso e abbrevia il tempo di lavorazione.
 - Una maggiore quantità d'acqua diminuisce la durezza del gesso e allunga il tempo di lavorazione.
2. Rimuovere il modello dall'impronta dopo circa 30 minuti.
3. Dopo due ore il gesso ha le ottimali proprietà di taglio.

Confezioni

1 Fustino = 5 kg

REF 54812

1 Fustino = 12 kg

REF 54811

Attenzione

Proteggere dall'umidità, richiudere il contenitore dopo l'uso.

Garanzia

Le nostre raccomandazioni riguardanti la tecnica d'applicazione, siano esse fornite in forma verbale, scritta o con pratiche istruzioni d'uso, si basano sulle esperienze e sulle prove da noi condotte e possono pertanto essere considerate solo a titolo indicativo.

I nostri prodotti sono soggetti a costanti perfezionamenti. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche sia per quanto riguarda la costruzione che la composizione.