

Retraction Solutions

3M™ ESPE™ Astringent Retraction Paste



L'innovazione sta nella punta:
extra fine per rendere tutto
più facile ed **efficace**.



Guarda
i nostri
video su
You Tube

NUOVO!

3M ESPE

Stai cercando uno strumento semplice per ottenere la retrazione gengivale che desideri?



La 3M ESPE ha sviluppato queste capsule **dotate di una punta molto fine** che possono essere inserite nel solco, permettendo alla pasta astringente di essere applicata in profondità.

È un mezzo semplice ma efficace per ottenere retrazione gengivale.


Vantaggi:

- Veloce: la procedura consente un notevole risparmio di tempo: **50% più veloce** rispetto all'utilizzo di fili di retrazione.
- Efficace: l'applicazione del gel emostatico nella profondità del solco gengivale, crea un'area pulita e asciutta, **più duratura rispetto all'uso di 2 fili di retrazione**.
- Semplice: le capsule **si adattano a tutti i dispenser** e hanno gel sufficiente per 3 solchi.

Come si usa




1 Aprire il blister e posizionare la capsula in qualunque dispenser per capsule presente in studio. Estrudere una piccolissima quantità di pasta di verifica.

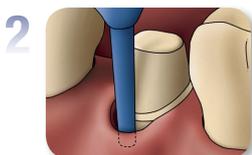

2 Posizionare il terminale della capsula all'interno del solco.




3 Estrudere lentamente la pasta astringente all'interno del solco. Riempire completamente il solco.

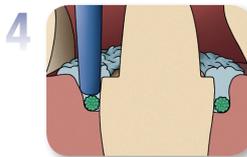

OPTIONAL:

PROCEDURE CON FILO DI RETRAZIONE.

Nel caso in cui si voglia il massimo di retrazione gengivale, il gel astringente può essere usato anche in combinazione con un filo retrattore applicato prima della pasta.

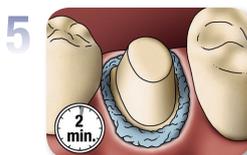

5 Lasciare agire la pasta per minimo 2 minuti.



6 Rimuovere completamente la pasta lavando, asciugando e aspirando.

3M™ ESPE™ Astringent Retraction Paste. Il sistema più igienico: capsule monodose-monouso.

Facile accesso e apertura del solco



Punta sottile e arrotondata

Beccuccio lungo, sottile con anello di posizione


L'anello indicatore aiuta a posizionare la punta alla giusta profondità del solco

Facile estrusione della pasta con elevata viscosità



La densità del gel permette una facile estrusione

Semplice fissaggio della capsula al dispenser

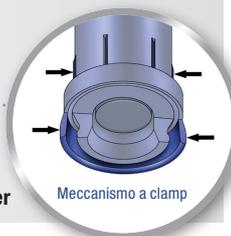

Meccanismo a ciamp

Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione prodotto
56944	3M™ ESPE™ Astringent Retraction Paste Refill Pack – 25 capsule
56945	3M™ ESPE™ Astringent Retraction Paste Value Pack – 100 capsule



3M ESPE

3M Italia S.p.A.
20096 Poglieto (MI)
Via Norberto Bobbio, 21
Tel. 02.7035.2419
www.3mespe.it

3M e ESPE sono marchi registrati di 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizzato su licenza in Canada.

© 3M 2012. Tutti i diritti riservati.