

NEW

Cention[®] Forte

Materiale da otturazione bioattivo polvere-liquido*



La nuova **alternativa**
all'amalgama

ivoclar
vivadent[®]

*Rilascio bioattivo di ioni di fluoro, calcio e idrossido

Innovativo

Cention Forte, ad elevata resistenza, rappresenta l'innovativa alternativa all'amalgama per i restauri di Classe I e II.

Da molti anni l'amalgama è utilizzata con successo come materiale da otturazione dentale nell'ambito delle sue indicazioni. Cionondimeno, la richiesta di una valida alternativa è preminente. In generale l'amalgama non è molto amata, a causa del colore intrinseco grigio e del contenuto di mercurio del 50%.


Cention Forte ha il colore dentale e possiede un'elevata resistenza alla flessione. Questo nuovo materiale da otturazione autoindurente, a rilascio di ioni bioattivi, appartiene al gruppo di materiali degli Alkasiti. Il riempitivo alcalino di questo materiale da otturazione brevettato aumenta il rilascio di ioni di idrossido durante gli attacchi acidi, regolando il valore del pH e aiutando a prevenire la demineralizzazione della struttura del dente.

Inoltre, il rilascio di elevate quantità di ioni di fluoro e calcio costituisce una solida base per la remineralizzazione dello smalto dentale.

100%

Sostituzione volumetrica

Tre motivi per i quali Cention Forte risulta superiore al cemento vetroionomerico in alternativa all'amalgama

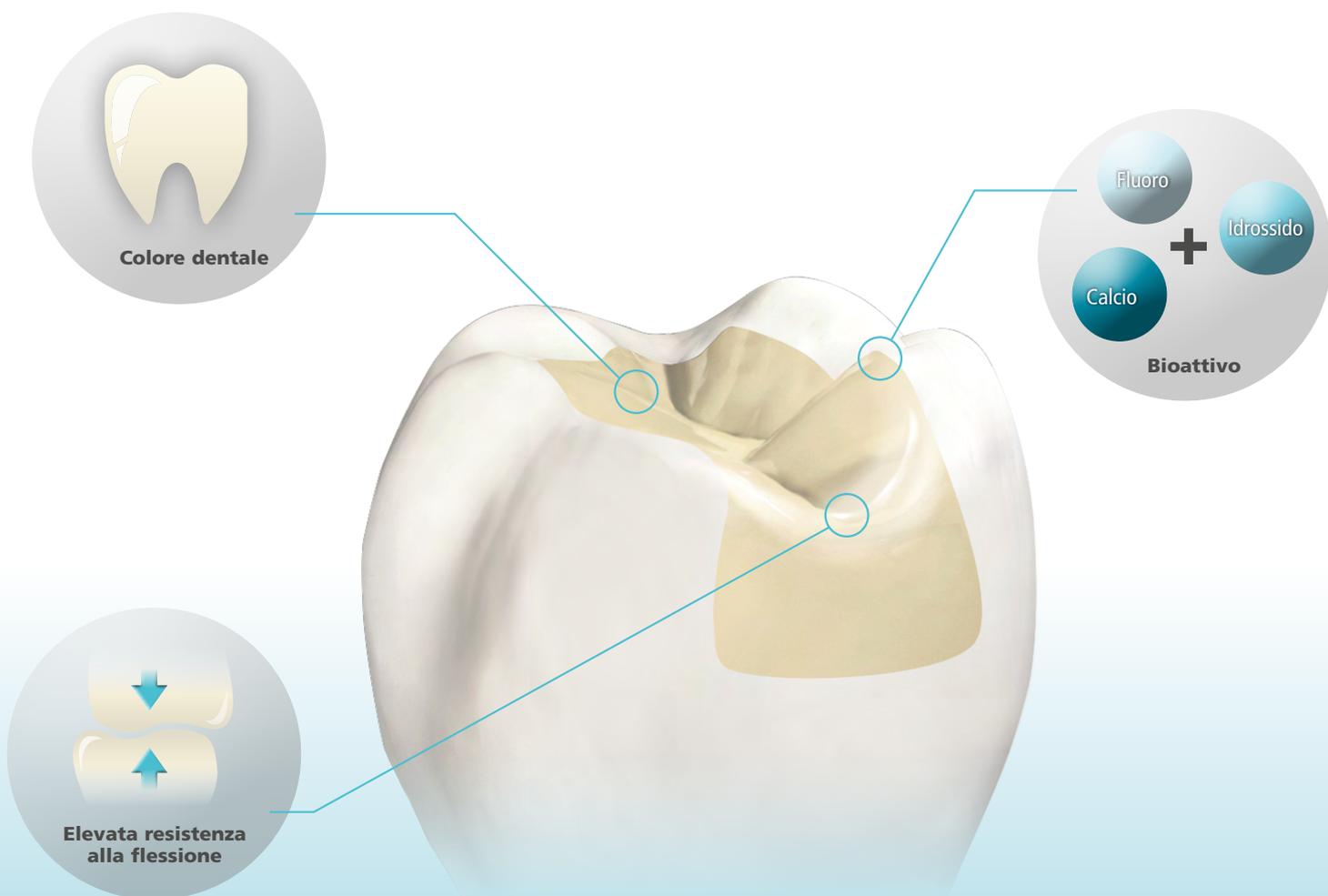


Lunga durata

Elevata resistenza alla flessione per la resistenza a stress dei restauri di Classe I e II

Studi clinici hanno confermato che una resistenza alla flessione ≥ 100 MPa costituisce un importante fattore per i restauri di lunga durata ^[1,2]. Questa è la differenza sostanziale tra Cention Forte ed il cemento vetroionomerico. Con ≥ 100 MPa, Cention Forte offre un'ottima resistenza alla flessione per sopportare gli stress dei restauri posteriori.

Resistenza alla flessione [MPa] (autoindurente)

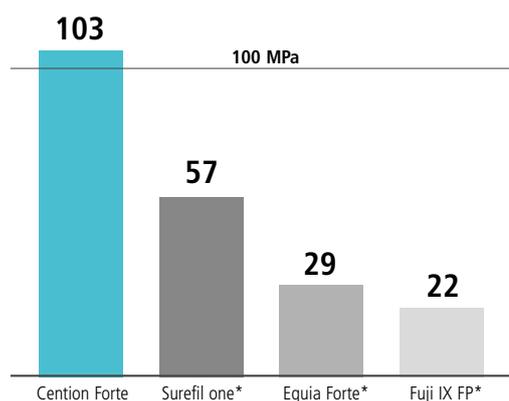

* Non è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein, 2020

≥ 100 MPa
resistenza alla
flessione



^[1] S. D. Heintze et al., Dent. Mater. 2017, 33 (3), e101-e114

^[2] S. D. Heintze, B. Zimmerli, Schweiz Monatsschr Zahnmed 2011, 121, 804-809

Estetica

Maggiore estetica rispetto all'amalgama e al cemento vetroionomerico

Cention Forte è di colore dentale e possiede un'elevato livello di traslucenza di circa l'11%. Ciò consente a Cention Forte di integrarsi naturalmente con la struttura del dente circostante, coprendo contemporaneamente la dentina scolorita.

Oltre il 90% dei pazienti trattati con Cention Forte ha giudicato il prodotto di livello buono-eccezionale in termini di proprietà estetiche e funzionalità^[3,4].



Vista pre-operatoria

Preparazione cavità

Applicazione di Cention Primer

Risultato

Foto: Dr Simon Botond, Private Practice Budapest, 2020



^[3] M. Özcan, Study Report, Istanbul, 2017

^[4] Lawson NC et al., Study Report, Birmingham, USA, 2017


Rapido

Una combinazione ideale

Il bicomponente Cention Primer è ideato specificatamente per l'uso con Cention Forte. Questo primer automordenzante e autoindurente fornisce una base ideale per l'utilizzo di Cention Forte.

Applicazione semplice e rapida

Cention Forte è semplice da usare. Ricoprire e frizionare la cavità preparata con Cention Primer. Attivare la capsula Cention Forte, mescolare il contenuto e riempire la cavità con il materiale. Una volta solidificato il materiale, è possibile rifinirlo con idonee frese per metallo duro.

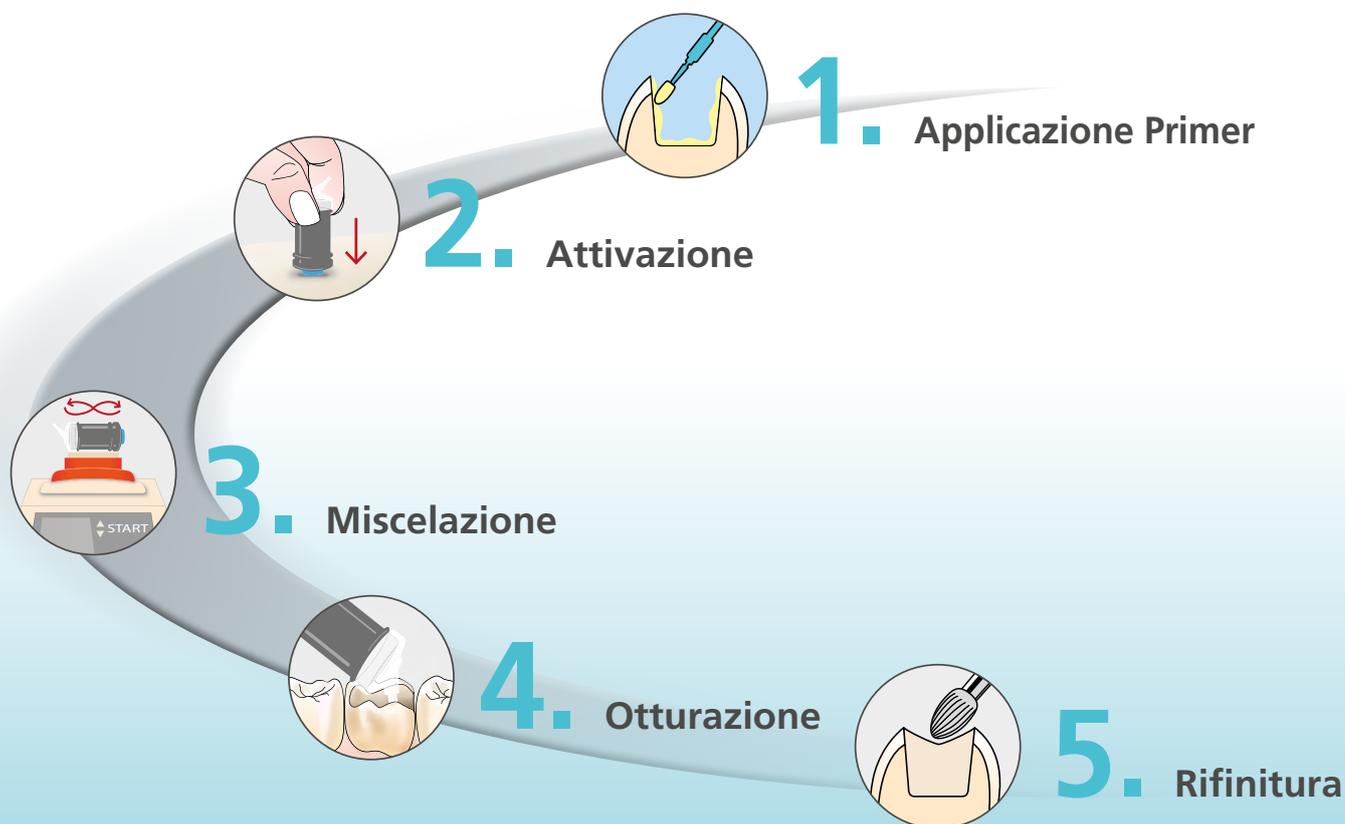

Economico

≥100
restauri
dente singolo

Fino a 100 restauri dente singolo in una confezione Jumbo Refill

Una capsula da 3 g di Cention Forte contiene sufficiente materiale per effettuare un restauro esteso di Classe II, consentendo maggiore efficienza e redditività. Per i restauri estesi è possibile applicare uno strato aggiuntivo senza ulteriori passaggi.

Confezionamenti

Cention Forte Start cap. 20x0,3g A2/Primer 1x3g Cention Forte capsule Cention Primer	20x0,3g 1x3g 25x applicatori microbrush	740831WW
Cention Forte Kit cap 50x0,3g A2/Primer 1x6g Cention Forte capsule Cention Primer	50x0,3g 1x6g 50x applicatori microbrush	740832WW
Cention Forte Refill capsule 50x0,3g A2 Cention Forte capsule	50x0,3g	740829WW
Cention Forte Jumbo Refill capsule 100x0,3g A2 Cention Forte capsule	100x0,3g	740830WW
Cention Primer Refill 1x6g Cention Primer	1x6g 50x applicatori microbrush	740833WW
Applicatore capsule Refill	1x	694767AN:
Silamat S6 100-240 V	1x	602286 WA/WG/WS/WU

