



Ufi Gel® SC / P · Ufi Gel® hard / C

IL SISTEMA DI RIBASATURA PER OGNI TIPO DI
APPLICAZIONE

Ufi Gel® SC / P · Ufi Gel® hard / C

IL SISTEMA DI RIBASATURA PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE

L'atrofia dell'osso mascellare dovuta all'età, la perdita di osso a seguito di estrazioni e parodontite solitamente portano a un peggioramento dell'adattamento delle protesi parziali o totali. Ne consegue una riduzione della tenuta della protesi dentale, che influisce negativamente sulla funzione masticatoria e sulla fonetica. Inoltre, il comfort del paziente è considerevolmente ridotto.

In questi casi, la ribasatura risulta necessaria per adattare la protesi ai cambiamenti che sono avvenuti nell'osso mascellare.

Vi sono diversi modi per ripristinare la precisione di adattamento e quindi la tenuta corretta di una protesi parziale o totale.

Oltre alla ribasatura indiretta che richiede il coinvolgimento del laboratorio, la protesi può essere ribasata con un materiale duro o non indurente in una sola seduta in studio. Questa applicazione fa risparmiare tempo ed è vantaggiosa in quanto il paziente non deve essere privato della protesi per lungo tempo e non è necessario un secondo appuntamento per applicare la protesi ribasata.

I materiali Ufi Gel riscuotono il successo del mercato già dal 1997 e rappresentano un'opzione per eseguire ribasature dirette, sia dure sia non indurenti, in una sola seduta in studio.

Ufi Gel® SC / P

Ufi Gel SC è un materiale per ribasatura non indurente a base di silicone A. Ufi Gel P è la corrispondente versione con miscelazione manuale.

Ufi Gel® hard / C

Ufi Gel hard è il materiale permanente per protesi a base di polimetacrilato, con indurimento mediante polimerizzazione a freddo. Ufi Gel hard è disponibile sia nella versione in cartucce che in quella con miscelazione manuale.

Il sistema Ufi Gel offre una soluzione di ribasatura specifica per ogni situazione. Ufi Gel hard / C e Ufi Gel SC / P rappresentano un'aggiunta ideale al lavoro protesico di routine. Il sistema Ufi Gel facilita soprattutto la ribasatura in studio in una sola seduta. Dopo solo una visita, il paziente può lasciare lo studio con una protesi perfettamente ribasata.



Ufi Gel® SC / P

MATERIALE PER RIBASATURA MORBIDA, PERMANENTE

Diversi sono i requisiti di un materiale per ribasatura non indurente. Tra questi vi sono la delicatezza nei confronti della mucosa orale, la tenuta salda alla base sintetica dura, la capacità di rimanere morbido in modo permanente, nonché l'elevata elasticità e la buona resilienza. Inoltre, la ribasatura dovrebbe essere liscia, con superfici facili da lucidare, con una corrispondenza di colore ottimale e consistente. In quanto materiale non indurente, Ufi Gel SC / P di VOCO soddisfa tutti questi requisiti.

Con Ufi Gel SC / P, VOCO offre un silicone per ribasatura di qualità superiore che garantisce praticità a clinico e comfort al paziente e che permette una ribasatura completa in una sola seduta.

Le indicazioni

Nell'ambito dei trattamenti di pazienti portatori di protesi, le indicazioni cliniche sono: ritenzione o adesione insufficiente della protesi, cresta atrofica, decubiti, nonché trattamenti della mucosa e dell'arcata. Inoltre, Ufi Gel non indurente è indicato per il riadattamento della protesi e come supporto per la guarigione in implantologia.

Procedura lineare e adesione salda

Il comprovato sistema in cartucce Ufi Gel SC assicura ogni volta un corretto rapporto di miscelazione e quindi un notevole risparmio di materiale e di tempo, con un'eccellente qualità. Ufi Gel SC / P è compatibile con tutti i materiali PMMA convenzionali. In combinazione con l'esclusivo adesivo, si ottiene un legame eccezionalmente forte tra la protesi e il materiale di ribasatura, assicurando un perfetto adattamento della protesi grazie alle sue eccezionali proprietà. La ribasatura realizzata con Ufi Gel SC / P può essere lucidata rapidamente e facilmente con il lucidante incluso nel kit.

Rispettoso dei tessuti, confortevole e batteriostatico

Ufi Gel SC / P è a base di silicone A e quindi estremamente ben tollerato, in quanto dopo l'indurimento non vengono rilasciati monomeri residui o altri componenti. Ufi Gel SC / P è privo di sapore e si caratterizza per l'eccellente corrispondenza di colore con la protesi e per l'elevato comfort per il paziente. L'aspetto estetico del restauro è creato dal materiale rosa traslucido che imita il colore del tessuto circostante e non si decolora nel tempo.

Il comfort per il paziente è garantito da una parte dalle eccezionali proprietà di adattamento e dall'altra dall'elevata elasticità e dall'eccellente resilienza. Ufi Gel SC / P rimane morbido in modo permanente in quanto è un silicone A con un basso valore Shore A di durezza. La pressione masticatoria viene ammortizzata e distribuita su un'area ampia. Ufi Gel SC / P è quindi idealmente adatto per la ribasatura in presenza di ferite, come per esempio dopo l'inserimento di impianti. Nell'ambito della terapia implantare, la superficie liscia, priva di pori e idrofoba del silicone A contribuisce al successo. Ufi Gel SC / P previene la colonizzazione dei germi e dei batteri, minimizzando il rischio di infezioni della ferita.

Realizzazione semplice di una ribasatura non indurente con Ufi Gel®



Ufi Gel® hard / C

IL MATERIALE PER RIBASATURA DURA

Ogni tipo di protesi dentale a supporto mucoso richiede controlli periodici. Il riassorbimento e le procedure di ricostruzione possono causare nel lungo tempo incongruità tra la base della protesi e la mucosa. Questo spesso porta a uno scarso adattamento della protesi e / o a una riduzione della ritenzione e a monconi naturali sovra stressati e punti di pressione. Le conseguenze sono danni parodontali, disturbi funzionali, modifiche della masticazione a causa di dolore e generale insoddisfazione del paziente nei confronti della protesi. Le ribasature con lo scopo di bilanciare tali incongruità spesso sono il risultato di sedute di controllo e sono essenziali per il successo protesico a lungo termine.

Le indicazioni

Tra le indicazioni vi sono la ribasatura permanente dura in caso di incongruità di protesi parziali e totali a supporto mucoso, modifiche dei bordi della protesi quando non è necessario un'espansione dei bordi. Con Ufi Gel hard / C è possibile eseguire negli anni un adattamento a strati.

Il materiale

Ufi Gel hard / C è un materiale a base di polimetilmetacrilato simile alla resina per protesi per ribasature dure in una sola seduta.

Durante lo sviluppo del materiale per ribasatura dura e la combinazione ottimale dei componenti, è stata prestata particolare attenzione a realizzare un materiale dal sapore e odore neutri, nonché con ingredienti allergenici.

Ufi Gel hard / C è un materiale esente da MMA. Contiene una minima quantità di monometacrilato (< 3 vol.-%), così da evitare irritazioni della mucosa o allergie da contatto. Inoltre, Ufi Gel hard / C non sviluppa un aumento di temperatura apprezzabile durante la polimerizzazione.

Il semplice confezionamento di Ufi Gel hard C in cartuccia assicura una consistenza omogenea e un'applicazione del materiale da ribasatura assolutamente priva di bolle. Le due fuoriuscite separate della cartuccia evitano la reazione involontaria dei componenti contenuti nella cartuccia.

La ribasatura con Ufi Gel hard / C offre un'alternativa rapida e semplice alla ribasatura in laboratorio. Mediante l'impronta diretta, la ribasatura con Ufi Gel hard / C è molto precisa e non differisce da quella realizzata in laboratorio per quanto riguarda la durezza, la praticità e la pulizia.

Realizzazione semplice di una ribasatura dura con Ufi Gel® hard / C



Ufi Gel® SC / P · Ufi Gel® hard / C

RIBASATURA CON IL SISTEMA

Uso e indicazione	Ufi Gel® SC / P	Ufi Gel® hard / C
Ribasatura	Ribasatura non indurente	Ribasatura dura
Durata	A medio termine, da 2 settimane a 2 anni	A lungo termine, permanente
Ribasatura generale		
Ribasatura totale	•	•
Ribasatura parziale	•	•
Protesi immediata / provvisoria	•	
Protesi definitiva	•	•
Per scopi di terapia		
In caso di dolore da pressione	•	•
In caso di infezioni dell'arcata	•	
In caso di tessuto iperplasico	•	
Dopo interventi e guarigione della ferita	•	•
Dopo trattamenti implantari	•	
In caso di epitesi	•	
Restauro della protesi		
In caso di ritenzione inadeguata	•	•
Per un miglior confort per il paziente	•	•
In caso di atrofia	•	•
Per modifiche a strati		•
Mediante estensione della protesi		•
In caso di stomatite da protesi	•	•
Estensione dei bordi della protesi	•	•

Ufi Gel® SC / P · Ufi Gel® hard / C

I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

Ufi Gel® SC / P

- Ribasatura rapida in una sola seduta
- Sapore e odore neutri
- Forte adesione tra ribasatura e protesi
- Aspetto altamente estetico grazie alla corrispondenza di colore
- La superficie liscia e idrofoba inibisce lo sviluppo di germi e candidosi
- Pulizia più semplice
- Elevata elasticità permanente, resistenza all'abrasione e forza tensile, nonché buona stabilità dimensionale
- Esperienza clinica a lungo termine positiva



Confezionamento

Ufi Gel® SC

REF 2041	Set cartuccia 50 ml, adesivo flacone 10 ml, lucidante base 10 ml, lucidante catalizzatore 10 ml, puntali di miscelazione tipo 8
REF 2040	Cartuccia 50 ml, puntali di miscelazione tipo 8
REF 2029	Adesivo flacone 10 ml
REF 2047	Lucidante flacone 20 ml
REF 2049	Dischi di lucidatura, 10 pz.

Ufi Gel® P

REF 2070	Set tubo base 50 ml, catalizzatore 50 ml, lucidante base 10 ml, lucidante catalizzatore 10 ml, adesivo flacone 10 ml, accessori
REF 2071	Tubo 2 x 50 ml (base / catalizzatore)
REF 2076	Adesivo flacone 10 ml
REF 2077	Lucidante flacone 20 ml

Ufi Gel® hard / C

- Ribasatura completa in studio in una sola seduta
- Applicazione dalla cartuccia semplice, con risparmio di tempo e materiale
- Lucidatura rapida e semplice
- Forza adesiva duratura tra la ribasatura e il materiale della protesi
- Nessun sviluppo di calore durante l'indurimento nella cavità orale, aumentando così la precisione di adattamento
- Colore ed estetica stabili nel tempo



Confezionamento

Ufi Gel® hard C

REF 2215	Set cartuccia 80 g, adesivo flacone 10 ml, puntali di miscelazione tipo 8
REF 2218	Set + dispenser cartuccia 80 g, adesivo flacone 10 ml, puntali di miscelazione tipo 8
REF 2216	Cartuccia 80 g, puntali di miscelazione tipo 8
REF 2217	Adesivo flacone 10 ml

Ufi Gel® hard

REF 2210	Set polvere 60 g, liquido flacone 40 ml, condizionatore flacone 20 ml, accessori
REF 2211	Polvere 60 g
REF 2212	Liquido flacone 40 ml
REF 2213	Conditioner flacone 20 ml

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.it

Disponibile presso: