

Temporary Cement


TempoSIL[®] 2

UN cemento provvisorio in PVS per diverse superfici e indicazioni

- Forte adesione dei restauri provvisori alla struttura dentale naturale, ai materiali per la ricostruzione del moncone e alle leghe metalliche, così come alle superfici in ossido di zirconio
- Agevole applicazione e rimozione
- Rapido tempo di indurimento
- Due tonalità per applicazioni estetiche

TempoSIL 2 garantisce un'adesione ottimale alle diverse superfici e un'integrità marginale superiore. L'ideale equilibrio elastico della formulazione TempoSIL 2 garantisce una rimozione senza problemi del cemento provvisorio in eccesso. Per le applicazioni estetiche, TempoSIL 2 è oggi disponibile in due tonalità diverse: *bianco* e *dentina*.

Caso clinico: restauro provvisorio

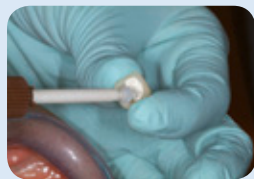

Applicare TempoSIL 2 direttamente nel restauro con il puntale intraorale.



Alloggiare il restauro applicando una delicata pressione.



Mantenere il restauro in posizione per 30-60 s.



A indurimento avvenuto, rimuovere il cemento TempoSIL 2 in eccesso.




Restauro provvisorio cementato.

Caso clinico: monconi implantari con ponte



Monconi implantari in posizione

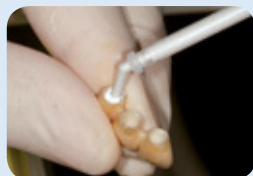

Applicare TempoSIL 2 direttamente nel restauro con il puntale intraorale.



Alloggiare il restauro in ossido di zirconio applicando una delicata pressione.




A indurimento avvenuto, rimuovere il materiale TempoSIL 2 in eccesso.



Restauro in ossido di zirconio cementato.

Integrità marginale superiore


Valutazione della penetrazione del colorante nelle corone provvisorie cementate con TempoSIL 2 dopo 2 settimane in acqua tiepida a 37 °C, seguita da 24 ore di penetrazione del colorante.*

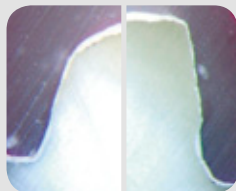

Il sigillo marginale superiore di TempoSIL 2 previene la penetrazione del colorante e riduce al minimo la dissoluzione.


Forte adesione

L'innovativa formulazione di TempoSIL 2 produce una ritenzione micro-meccanica su diverse superfici.*

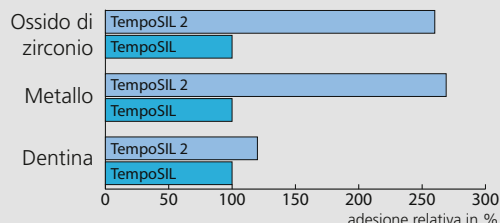

*Misurazioni interne

Rimozione senza problemi

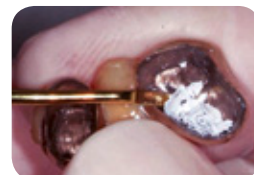

La rimozione non lascia alcun residuo.

Dati per l'ordinazione

- 3686 TempoSIL 2 Trial Pack**
1 x TempoSIL 2 dentina 5 ml; 1 x TempoSIL 2 bianco 5 ml
15 x Mixing Tips Brown long fine
- 6727 TempoSIL 2 dentina Kit introduttivo**
2 x TempoSIL 2 dentina 5 ml; 15 x Mixing Tips Brown long fine
- 6729 TempoSIL 2 bianco Kit introduttivo**
2 x TempoSIL 2 bianco 5 ml; 15 x Mixing Tips Brown long fine

- 6728 TempoSIL 2 dentina Ricarica**
4 x TempoSIL 2 dentina 5 ml
- 6730 TempoSIL 2 bianco Ricarica**
4 x TempoSIL 2 bianco 5 ml
- 6749 Ponte di miscelazione/Puntali intraorali**
40 x Mixing Tips Brown long fine

www.coltenewhaledent.com
© 2011 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 5300
Fax +41 (0)71 757 5301
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent