

Materiale da sottofondo bioattivo e resistente che rilascia e si ricarica di calcio, fosfato e più fluoro rispetto ai vetroionomeri

Cambia tutto quello che sai sui tradizionali vetroionomeri, vetroionomeri modificati con resina e compositi flowable: Activa BioACTIVE-BASE/LINER™ li sostituisce!

Tre componenti chiave:

- Resina ionica bioattiva brevettata
- Resina con componente elastica brevettata
- Fillers vetrosi bioattivi



ACTIVA BioACTIVE-BASE/LINER si applica con estrema facilità e sicurezza



1 Cavità preparata: lasciare la superficie del dente leggermente umida senza mordenzare



2 Riempimento della cavità: non è necessaria l'applicazione di sistemi adesivi






3 Le esclusive cannule ripiegabili permettono una perfetta applicazione senza bolle nel fondo della cavità



4 Fotopolimerizzare per 20 secondi e procedere alla stratificazione con ACTIVA-RESTORATIVE o con il materiale preferito

ACTIVA supera di gran lunga le caratteristiche fisiche ed è più facile da utilizzare rispetto ai BASE/LINER concorrenti

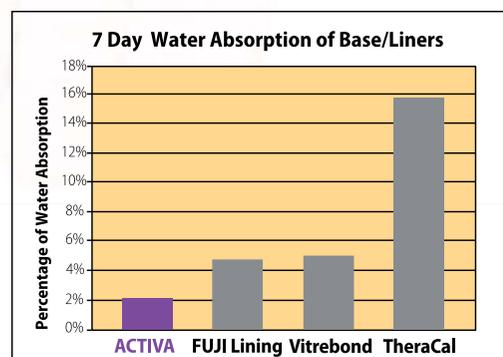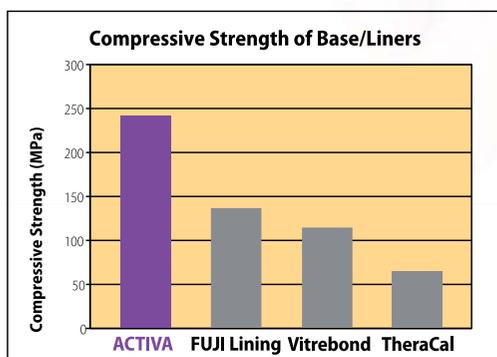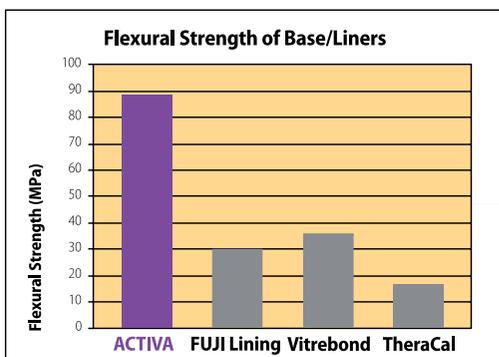

*ACTIVA = Base/Liner Bioattivo; Fuji Lining e Vitrebond = CVI rinforzato; TheraCal = Silicato di calcio modificato con resina
 Fuji Lining, Vitrebond e TheraCal sono, rispettivamente, marchi di fabbrica di GC, 3M ESPE e Bisco*